

Limpieza

Un tornado de alta potencia

Experimente una potente limpieza que marca la diferencia.

Este exclusivo aparato de limpieza mecánica reduce eficazmente hasta un 98 % de las bacterias*. Impresionante, ¿verdad?

Además, Finisher también es capaz de eliminar material de relleno.

Una solución universal tan revolucionaria que le hará entusiasmarse por la limpieza.

Así es como sacamos el máximo potencial a la endodoncia.

Descubra la razón:

fkg.ch/power



Finisher




Finisher
25/00


800-1000 r.p.m. – 1 Ncm

FKG
swiss endo


Una solución universal

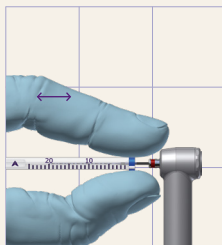

- Preparación mín. Ø 25.
- Fije la longitud de trabajo con la ayuda de la regla del tubo de plástico.

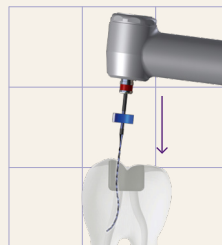

- Inicie con el conducto más ancho.
- Inserte el instrumento dirigiendo la punta hacia la corona y poner en funcionamiento el motor.

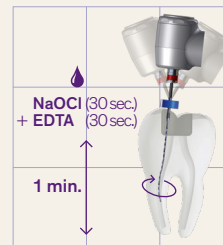

- Limpie el conducto por completo durante 1 minuto con movimientos longitudinales lentos y suaves de 7-8 mm.
- Proceda al enjuague final.

Limpieza conseguida



Más información



STERILE R

