

Nettoyage

Une tornade de puissance

Découvrez un nettoyage puissant qui change la donne. Ce dispositif de nettoyage mécanique unique en son genre élimine jusqu'à 98 % des bactéries*. Impressionnant, n'est-ce pas ?

Le Finisher permet également de retirer le matériau d'obturation.

Une solution universelle si innovante que vous deviendrez accro au nettoyage. C'est ainsi que nous dynamisons l'endodontie.

Découvrez pourquoi :
fkg.ch/power



Finisher




Finisher

25/00


800-1000 tr/min – 1 Ncm

FKG
swiss endo


Une solution universelle

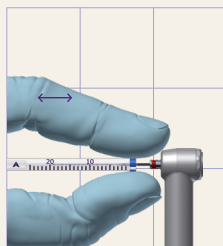

- Mise en forme min. Ø 25.
- Reporter la longueur de travail à l'aide du tube en plastique.

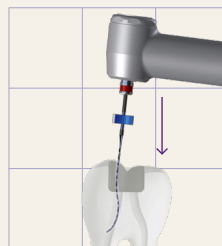

- Débuter par le canal le plus large.
- Insérer l'instrument en l'orientant contre la cuspidé et démarrer le moteur.

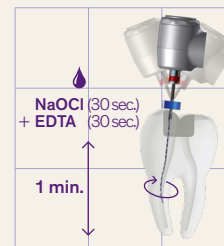

- Nettoyer l'intégralité du canal pendant 1 minute à l'aide de longs et doux va-et-vient (7-8 mm).
- Procéder au rinçage final.

Nettoyage terminé



En savoir plus

www.fkg.ch

FKG REF. 99.X00.10.17A.FR_REV1_2026-01-06 - © FKG Dentaire Sàrl



STERILE R

CE 1609

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Lode 4
2322 Le Crêt-du-Lode
Suisse