

Detersione

Una forza portentosa

Per una detersione intensa senza eguali.
Questo dispositivo di detersione meccanica unico riduce efficacemente i batteri fino al 98%*. Impressionante, vero? Finisher è in grado rimuovere anche il materiale di otturazione.
Una soluzione universale così rivoluzionaria che farà diventare ogni utilizzatore un fanatico della detersione. Ecco come aumentiamo la performance dell'endodonzia.

Scopri perché:

fkg.ch/power



Finisher




Finisher

25/00


800-1000 rpm – 1 Ncm

FKG
swiss endo


Una soluzione universale

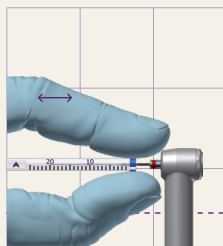

- Preparazione min. Ø 25.
- Riportare la lunghezza di lavoro utilizzando il tubo di plastica.

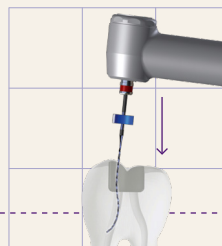

- Iniziare con il canale più ampio.
- Inserire lo strumento puntando verso la cuspid e avviare il motore.

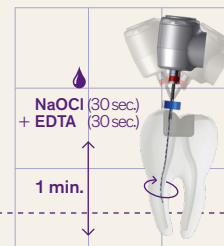

- Pulire l'intero canale per 1 minuto con movimenti lunghi e delicati avanti e indietro (7-8 mm).
- Procedere al risciacquo finale.

Pulizia eseguita



Maggiori informazioni



STERILE R

