

## Limpeza

# Tornado de potência

Experimente uma limpeza poderosa que se destaca. Este exclusivo dispositivo de limpeza mecânica reduz eficazmente até 98% das bactérias\*. Impressionante, não acha? A Finisher consegue remover também material de obstrução. Uma solução universal tão revolucionária que vai fazer de si um fanático das limpezas. É assim que damos poder à endodontia.

Descubra porquê:  
[fkg.ch/power](http://fkg.ch/power)



# Finisher




Finisher

25/00


800-1000 rpm – 1 Ncm

FKG  
swiss endo


## Uma solução universal

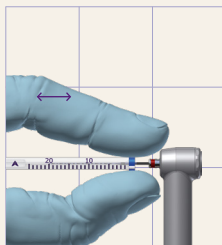

- Preparo mín. Ø 25.
- Definir o comprimento de trabalho utilizando o tubo de plástico.

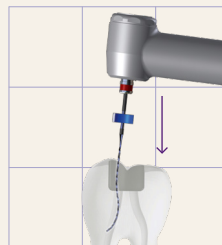

- Começar com o canal mais largo.
- Inserir o instrumento alinhando a ponta de frente para a cúspide e ativar o motor.

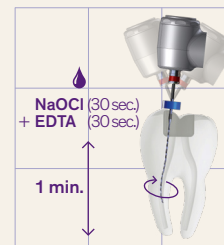

- Limpar o canal por inteiro durante 1 minuto com movimentos longitudinais lentos e suaves de 7-8 mm.
- Proceder ao enxágue final.

## Limpeza alcançada



Mais informações

www.fkg.ch

FKG REF. 99.X00.10.17A\_PT\_REV1\_2026-01-06 - © FKG Dentaire Sàrl



STERILE R

CE 1609

FKG Dentaire Sàrl  
Le Crêt-du-Locle 4  
2322 Le Crêt-du-Locle  
Suisse