




Spülung Voll im Flow

In der Endodontie sind Präzision und effektive Arbeitsabläufe entscheidend – nichts sollte Sie aus dem Rhythmus bringen. Jedes Spülen, jeder Wechsel und jede Unterbrechung beeinträchtigt die Dynamik. Mit Dual Rinse HEDP ändert sich das. Mit nur einem Schritt reinigt es, löst Ablagerungen auf und bereitet den Kanal vor – ohne Unterbrechung des Arbeitsflusses. Weniger Spritzen. Weniger Zwischenschritte. Nur nahtlose Bewegungen vom ersten bis zum letzten Schritt. Endlich eine Spülung, die sich Ihrem Tempo anpasst. Eine Kapsel. Ein Protokoll. Eine Sache weniger, an die Sie denken müssen. Auf diese Weise setzen wir neue Maßstäbe in der Endodontie.


Alle Infos unter:
fkf.ch/flow




Dual Rinse® HEDP

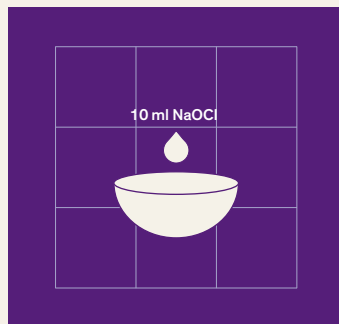


- 10 ml Natriumhypochlorit (NaOCl) in einen sterilisierten Mischbecher geben.

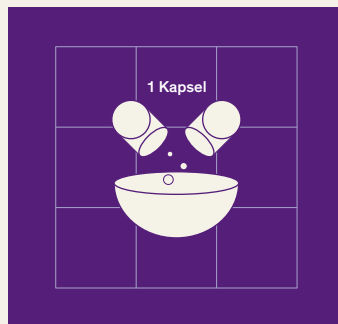

- Eine Kapsel **Dual Rinse HEDP** öffnen und das Pulver in den Mischbecher geben.

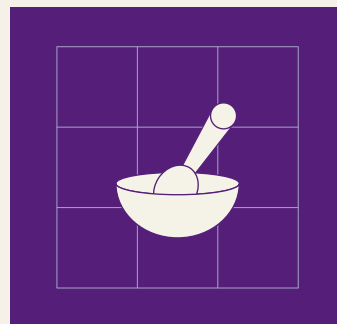

- Das NaOCl/**Dual Rinse HEDP** Pulver mit einem sterilen Instrument verrühren, bis es sich vollständig aufgelöst hat.

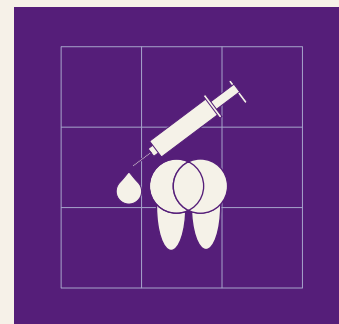

- Die Lösung gemäß dem endodontischen Spülprotokoll verwenden.



Weitere Infos