



Dual Rinse® HEDP

Irrigación

Navegar el flujo

La endodoncia es un procedimiento que implica precisión y fluidez y nada debería interrumpirlo. Cada irrigación, cada cambio de jeringa y cada pausa hacen que se pierda el ritmo. Dual Rinse HEDP lo cambia todo. En un único paso, limpia, disuelve y acondiciona el conducto sin cortar el flujo de trabajo. Son necesarias menos jeringas y menos transiciones. Es un movimiento puro y sin interrupciones de principio a fin. Es hora de que la irrigación le siga el ritmo a usted. Una cápsula, un protocolo y una cosa menos en la que pensar. Así es como sacamos el máximo potencial a la endodoncia.

Descubra la razón:
fkq.ch/flujo




Dual Rinse® HEDP




FKG
swiss endo




- Vierta 10 ml de hipoclorito de sodio (NaOCl) en un recipiente de mezcla esterilizado.

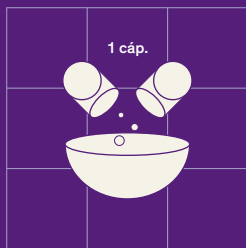

- Abra una cápsula de **Dual Rinse HEDP** y vierta el polvo en el recipiente de mezcla.

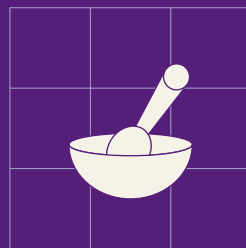

- Mezcle el NaOCl/**Dual Rinse HEDP** con un instrumento estéril hasta que se disuelva por completo.

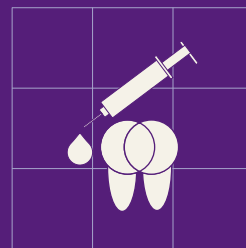

- Emplee la solución conforme al protocolo de enjuague endodóncico.



Más información

www.fkg.ch

FKG REF. 99.660.10.01A.ES_REVO_2025-08-20 - © FKG Dentaire Sàrl



Medcem GmbH
Bahnhofstrasse 12
8570 Weinfelden
Suiza