



Dual Rinse® HEDP

Irrigazione

Dominate il flusso

L'endodonzia è una disciplina che richiede precisione e fluidità del processo. Niente deve compromettere il ritmo dell'odontoiatra. A ogni irrigazione, variazione e pausa si perde la concentrazione. Dual Rinse HEDP viene in aiuto dei dentisti. In un unico passaggio, pulisce, dissolve e prepara il canale senza interrompere il flusso di lavoro. Meno siringhe. Meno transizioni. Solo puro movimento continuo dall'inizio alla fine. È giunto il momento che l'irrigazione segua il ritmo del dentista. Una capsula. Un protocollo. Una cosa in meno a cui pensare. Ecco come aumentiamo la performance dell'endodonzia.

Scopri perché:
fkg.ch/flusso



Dual Rinse® HEDP



FKG
swiss endo

10 ml di NaOCl



- Versare 10 ml di ipoclorito di sodio (NaOCl) in una ciotola sterilizzata.

1 cap.



- Aprire una capsula di **Dual Rinse HEDP** e versare la polvere nella ciotola di miscelazione.



- Mescolare l'NaOCl/**Dual Rinse HEDP** con uno strumento sterile fino alla dissoluzione completa.



- Utilizzare la soluzione in conformità al protocollo di risciacquo endodontico.



Maggiori informazioni

www.fkg.ch

FKG REF. 99.660.10.01A.IT_REV0_2025-08-20 - © FKG Dentaire Sàrl

