



Dual Rinse® HEDP

Irrigação

Ao sabor do fluxo

A endodontia é uma questão de precisão e fluxo - e nada deve perturbar o seu ritmo. O ritmo é afetado com cada irrigação, cada mudança e cada pausa. Dual Rinse HEDP vem mudar isso. Com um único passo, limpa, dissolve e prepara o canal sem interromper o fluxo. Menos seringas. Menos transições. Apenas movimento puro e ininterrupto do início ao fim. Já era tempo de a sua irrigação acompanhar o seu ritmo. Uma cápsula. Um protocolo. Menos uma coisa em que pensar. É assim que damos poder à endodontia.

Descubra porquê:
fkg.ch/fluxo



Dual Rinse® HEDP



FKG
swiss endo

10 ml de NaOCl



- Deitar 10 ml de hipoclorito de sódio (NaOCl) num copo de mistura esterilizado.

1 cápsula



- Abrir uma cápsula e deitar o pó de Dual Rinse HEDP no copo de mistura.



- Misturar o NaOCl com o Dual Rinse HEDP usando um instrumento estéril até à dissolução completa.



- Usar a solução de acordo com o protocolo de enxaguamento endodôntico.



Mais informações

www.fkg.ch

FKG REF. 99.660.10.01A.PT_REV0_2025-08-20 - © FKG Dentaire Sàrl



Medcem GmbH
Bahnhofstrasse 12
8570 Weinfelden
Suíça